

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА
(ШИНА ШАНЦА)**

БН6-53 (УСИЛЕННЫЙ)

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж на шейный отдел стабилизирует и разгружает шейный отдел позвоночника. Ограничивает подвижность и фиксирует положение головы и шеи таким образом, что нагрузка на мышцы снижается, тем самым уменьшается напряжение мышечных групп шеи и надплечья. Бандаж улучшает кровообращение головы и шеи, обеспечивает легкий теплосберегающий эффект тканей шейного отдела. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- шейный миозит;
- шейный корешковый синдром;
- повышенная подвижность позвонков в шейном отделе;
- нарушения тонуса мышц шеи;
- состояния после травм и операций шейного отдела позвоночника;
- состояния после инсультов (симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям);
- фиксация после обширных повреждений мягких тканей шеи (профилактика рубцовой деформации);
- комплексное лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника (после массажа, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры);
- комплексное лечение головной боли, головокружения;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.);
- болевые ощущения в шее.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов биндажа;
- острые заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При появлении дискомфорта в области применения биндажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ

Усиленный биндаж на шейный отдел позвоночника состоит из следующих элементов:

1. Шина, усиленная жесткой вставкой.
2. Застежка велкро для фиксации шины Шанца.
3. Сменный чехол из трикотажа.



ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Биндаж устанавливают на передней поверхности шеи, расположив выемку под подбородком, охватывают биндажом шею и застегивают его сзади застежкой велкро, отрегулировав длину биндажа по объему шеи.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с таблицей подбора размера подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

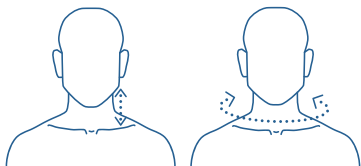


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Артикул	Размеры, см	
	Окружность шеи, см	Высота шеи, см
БН6-53-2-8-1	30-35	8
БН6-53-2-8-2	35-45	8
БН6-53-2-9-1	30-35	9
БН6-53-2-9-2	35-45	9
БН6-53-2-10-1	30-35	10
БН6-53-2-10-2	35-45	10

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника позволяет сохранить свойства и внешний вид изделия на более длительный срок:

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- дополнительный чехол можно стирать ежедневно, в том числе в стиральной машине (в режиме деликатной стирки);
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.



СОСТАВ

Бандаж: 95% эластичный пенополиуретан, 5% полиэтилен.

Чехол: 92% микрополиэстер, 8% эластан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. БН6-53 (усиленный), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04605 от 01.04.2009 г. выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ08.Д00818 (с 07.07.2014 г. по 06.07.2019 г.) выдана ООО «Медполимер-С».

Производитель: ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис ГмбХ, Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

