

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ  
ПОЗВОНОЧНИКА (ШИНА ШАНЦА)**

**БН6-53-4**

**БН6-53-5**



[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника ограничивает подвижность в шейном отделе позвоночника, оказывает легкий тепло-сберегающий эффект, способствующий улучшению кровообращения и сокращению сроков выздоровления.

Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- мышечная кривошея;
- состояние после травмы в родах;
- нарушения тонуса мышц шеи (гипертонус или гипотонус мышц);
- поддержка шейного отдела позвоночника у ослабленных и недоношенных детей;
- сохранение положения шеи после массажа, мануальной терапии, других лечебных процедур.

Перед применением бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника для детей до 1-го года обязательно посоветуйтесь с врачом!

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ.**

---

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

---

- индивидуальная непереносимость материалов бандажа;
- острые заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

---

При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.


## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки велкро, обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с таблицей подбора размера подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

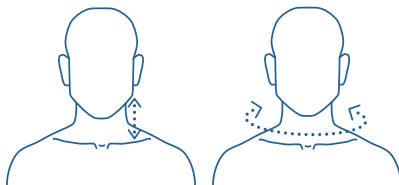

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Артикул/индекс	Размеры, см	
	Окружность шеи, см	Высота шеи, см
БН6-53-4	до 25	4
БН6-53-5	до 25	5

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

---

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия:

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- дополнительный чехол можно стирать ежедневно, в том числе в стиральной машине (в режиме деликатной стирки);
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.



## СОСТАВ

---

Основа: 100% пенополиуретан. Чехол: 100% хлопок.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

---

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

---

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

## СРОК ГОДНОСТИ

---

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия.  
Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. БН6-53, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04605 от 01.04.2009 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ08.Д00818 (с 07.07.2014 г. по 06.07.2019 г.) выдана ООО «Медполимер-С».

**Производитель:** ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис ГмбХ, Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



