

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
ПОЗВОНОЧНИКА (ШИНА ШАНЦА)**

БН6-53-6

БН6-53-7

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника ограничивает подвижность в шейном отделе позвоночника, оказывает легкий тепло-сберегающий эффект, способствующий улучшению кровообращения и сокращению сроков выздоровления.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- мышечная кривошея;
- состояние после травмы в родах;
- нарушения тонуса мышц шеи (гипертонус или гипотонус мышц);
- поддержка шейного отдела позвоночника у ослабленных и недоношенных детей;
- сохранение положения шеи после массажа, мануальной терапии, других лечебных процедур.

Перед применением бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника для детей до 1-го года обязательно посоветуйтесь с врачом!

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов бандажа;
- острые заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки велкро, обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с размерными таблицами подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

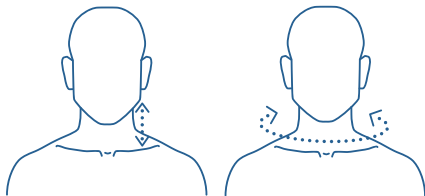


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Артикул/индекс	Размеры, см	
	Окружность	Высота
БН6-53-6	20-32	6
БН6-53-7	20-32	7

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника, позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия.

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- дополнительный чехол можно стирать ежедневно, в том числе в стиральной машине (в режиме деликатной стирки);
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.



СОСТАВ

Основа: 100% пенополиуретан. Чехол: 100% хлопок.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия.
Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. БН6-53, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации бандажа.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04605 от 01.04.2009 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ08.Д00818 (с 07.07.2014 г. по 06.07.2019 г.) выдана ООО «Медполимер-С».

Производитель: ООО «ТРЕЛАКС» для Рехард Технолоджис ГмбХ, Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

