

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ НА ГОЛЕНСТОПНЫЙ СУСТАВ**

**HAS-301**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Ортез Orlett на голеностопный сустав с регулятором объема движения, арт. HAS-301, стабилизирует и разгружает голеностопный сустав. При необходимости позволяет полностью иммобилизовать голеностопный сустав или увеличить объем сгибания-разгибания (с шагом в 10°), сохраняя боковую стабилизацию.

Конструкция ортеза позволяет иммобилизовать сустав в положении подошвенного сгибания и тыльного сгибания (при повреждениях ахиллова сухожилия). Перекат подошвы обеспечивает возможность физиологичной походки. Подушки-подпяточники снижают ударные нагрузки на голеностопный сустав и амортизируют при ходьбе.

Ортез способствует разгрузке пяточной кости, что в сочетании с широкой подошвой, позволяющей надевать ортез поверх послеоперационных повязок, способствует ранней мобилизации больного и ускорению выздоровления.

Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

---

- ранняя функциональная терапия при повреждениях связок голеностопного сустава, травмах лодыжек, внутрисуставных переломах и после реконструктивных операций на голеностопном суставе;
- повреждения ахиллова сухожилия;
- параличи и парезы стопы;
- послеоперационная и консервативная терапия переломов малоберцовой кости, предплюсны и плюсны;
- реабилитация после переломов костей стопы и нижней трети голени.

## **РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ**

---

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом;
- ортез не предназначен для ношения на обнаженной ноге;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования ортеза.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

## КОНСТРУКЦИЯ

Ортез Orlett на голеностопный сустав с регулятором объема движения, арт. HAS-301, состоит из следующих элементов:

1. мягкая муфта-сапожок (вкладной сапожок) с застежками-липучками велкро для мягкого и плотного прилегания ортеза;
2. пять фиксирующих ремней с застежками-липучками велкро;
3. две металлические шины с регуляторами (4) объема движений;
4. регулятор объема движения, позволяющий выставлять угол сгибания-разгибания или необходимый диапазон движений в суставе с шагом 10°;
5. подошва с перекатом;
6. съемный носочек к муфте-сапожку на застежке велкро для использования в холодную погоду.

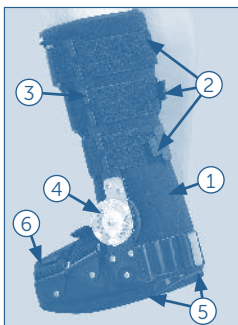


рис. 1



рис. 2

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Перед надеванием расстегнуть все ремни с застежками-липучками велкро. Установить необходимый угол иммобилизации или объем движения одинаковый для обоих шарниров (см. установку диапазона движения или угла сгибания-разгибания).
2. Вынуть вкладной сапожок. Стопу разместить на подошвенной части вкладного сапожка и закрепить соответствующую манжету. Затем зафиксировать манжету на голени (рис. 2).
3. Вдеть обутую во вкладной сапожок ногу в ортез. Зафиксировать ортез на ноге фиксирующими ремнями с застежками-липучками велкро. Сначала закрепить фиксирующие ремни на стопе, затем на голени.
4. Конструкция ортеза предусматривает съемный носочек, который можно пристегнуть с помощью застежек-липучек велкро в холодное время года.

## ВНИМАНИЕ!

Не следует слишком сильно утягивать фиксирующие ремни во избежание нарушения кровообращения.

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ УГЛА СГИБАНИЯ-РАЗГИБАНИЯ В ШАРНИРАХ

1. Открыть защитную крышку, сдвинув защелку «А» по направлению, указанному стрелкой.
2. С помощью двух запорных стержней установить требуемый угол фиксации или диапазон движений.
3. Закрыть защитную крышку до щелчка. Медиальный и латеральный шарниры должны иметь одинаковый угол фиксации или заданный диапазон движения.



рис. 3

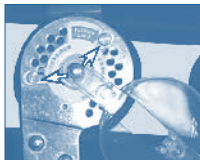


рис. 4



рис. 5

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

Ортез Orlett, арт. HAS-301, подбирается по размеру обуви.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

| Размер | Размер обуви (европейский) |
|--------|----------------------------|
| S      | до 37                      |
| M      | 37-41                      |
| L      | 41-44                      |
| XL     | более 44                   |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## СОСТАВ

20% полиамид, 18% полиуретан, 14% полиэстер, 7% полиуретан, 2% хлопок, 25% алюминий, 8% сталь, 6% полиэтилен.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

---

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. HAS-301, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74411 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

