

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ



КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ

LSO-991

- ПОЛНОСТЬЮ ФИКСИРУЕТ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА
- СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
- СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО НОШЕНИЯ ЗА СЧЕТ МАЛОГО ВЕСА



ИНСТРУКЦИЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ.
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ**

LSO-991

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Корсет ортопедический жесткий Orlett, арт. LSO-991, используется для полной фиксации, стабилизации и разгрузки позвоночника на уровне Th3-S3. По назначению врача может заменять громоздкий и тяжелый корсет из гипса. Стабилизирует связочно-суставной аппарат, и уменьшает нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты. Особенностью жесткого ортопедического корсета Orlett является легкий вес.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- травмы груднопоясничного отдела позвоночника;
- повреждения связочно-суставного аппарата груднопоясничного отдела позвоночника;
- острые боли в груднопоясничном отделе позвоночника в период обострения остеохондроза;
- грыжи межпозвонковых дисков с признаками компрессии корешков;
- спондилолистезы с угрозой травмы корешков спинного мозга;
- травмы груднопоясничного отдела позвоночника;
- состояния после операций на груднопоясничном отделе позвоночника;
- мышечные дистрофии;
- распад тел позвонков (туберкулез, остеомиелит, онкология).

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- патологии брюшной стенки (грыжи, свищи);
- синдром портальной гипертензии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача. Корсет следует надевать на нижнее белье, плотно прилегающее к телу. При возникновении физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего использования корсета.

КОНСТРУКЦИЯ

Корсет ортопедический Orlett, арт. LSO-991, состоит из следующих элементов (цифры на рисунках соответствуют элементам конструкции):

1. легкая рама высокой прочности, устойчивая к механическим нагрузкам;
2. реклинирующая часть рамы;
3. мягкая прокладка (обеспечивает защиту и мягкое прилегание к телу);
4. поддерживающая вставка на животе с ребрами жесткости, предупреждающими скручивание и улучшающими фиксирующие свойства корсета;
5. шесть регулируемых затяжек с застежками-липучками велкро (соединяют раму с поддерживающей вставкой);
6. регулируемые наплечные лямки с застежками-липучками велкро.

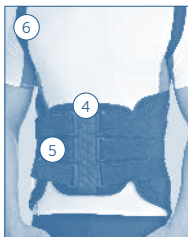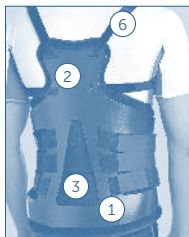


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет надевается в положении лежа.

1. Уложите пациента на корсет так, чтобы рама корсета с мягкой прокладкой (1, 3) плотно прилегала к гребням подвздошных костей.

2. Расположите на передней брюшной стенке поддерживающую вставку (4).
3. Пропустите регулирующие затяжки (5) через поворотные петли на вставке.
4. Отрегулируйте центральное расположение вставки и силу натяжения затяжек, натягивая правую и левую затяжки. Закрепите затяжки с помощью застежек-липучек велкро.
5. Отрегулируйте центральное положение реклинирующей части рамы (2), силу фиксации и разведение плечевого пояса с помощью наплечных лямок (6).

ПРАВИЛА ПОДБОРА

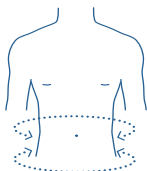

Для подбора размера жесткого ортопедического корсета Orlett, арт. LSO-991, сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРА

| Размер | Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см |
|--------|---|
| S | 75-90 |
| M | 90-105 |
| L | 105-120 |
| XL | 120-135 |

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушику

в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

30% полиамид, 13% полиуретан, 5% хлопок, 3% полиэстер, 40% акрилонитрилбутадиенстирол, 7% сталь, 2% полипропилен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. LSO-991, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ГРУДОПОЯСНИЧНЫЙ


LSO-991

- Ортопедический корсет Orlett LSO-991 обеспечивает полную степень фиксации позвоночника (Th3-S3).
- Корсет позволяет минимизировать нагрузку на тела позвонков, что особенно важно при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний.
- Корсет имеет малый вес при сохранении фиксирующих свойств, что делает его незаменимым при лечении длительно текущих заболеваний позвоночника.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

| РАЗМЕР | S | M | L | XL |
|---|-------|--------|---------|---------|
| СУММА ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ И БЕДЕР, ДЕЛЕННАЯ ПОПОЛАМ, СМ | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-135 |

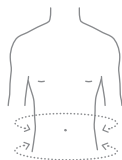

Товар является медицинским изделием. РУ № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен. Срок годности не установлен.

Импортер:

ООО «Орто Медикл Групп»
Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.



Производитель:

Рехард Технолоджис ГмБХ,
Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



Quality Management System
acc. to EN ISO 13485

